


## シリンジアシスタの接続方法

### 1. プランジャとプランジャアシスタの接続


プランジャトップをプランジャアシスタの接続部の凹みにしっかり差し込む

脱落防止のツメがあるため、挿入には少し抵抗があります。プランジャトップを回しながら進め、最後まで押し込むと確実に接続できます

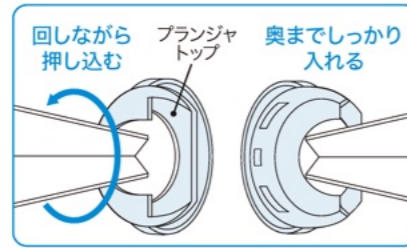

### Point

使用者の指と「指マーク」の向きを合わせてください

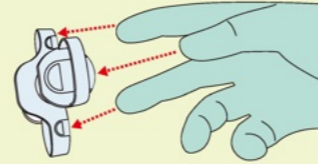


使用時に目盛りが読み取れる方向に接続してください




### 2. 外筒と外筒アシスタの接続

フィンガーリングがフランジの筒先側に来るように接続する。外筒のフランジを縦にして、外筒アシスタの接続部の凹みにしっかり差し込む

最後まで押し込むことで確実に接続できます

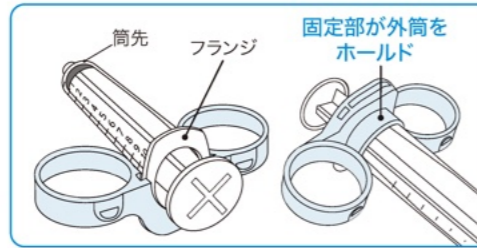

### 【接続時の注意点】

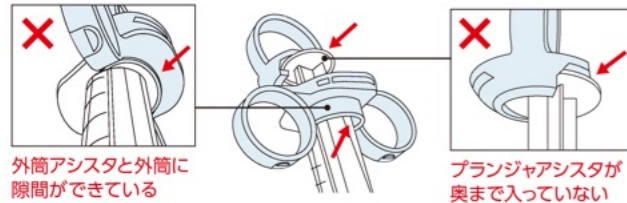

外筒アシスタと外筒に隙間ができています

プランジャアシスタが奥まで入っていない

### 注意事項


- ・本品は 10mL シリンジ専用です
- ・ご使用前に本品とシリンジとの適合性を必ずご確認ください
- ・しっかり接続できない場合は使用しないでください
- ・再滅菌不可（融解・変形のおそれがあります）

## ディスポーザブル・ニードルエクステンダの取出し方および使用方法


### 1. 袋を開封し、注射筒接続部を引き出す




### 2. 薬液が充填された注射筒の先端ルアーロック部に、注射筒接続部を取り付ける

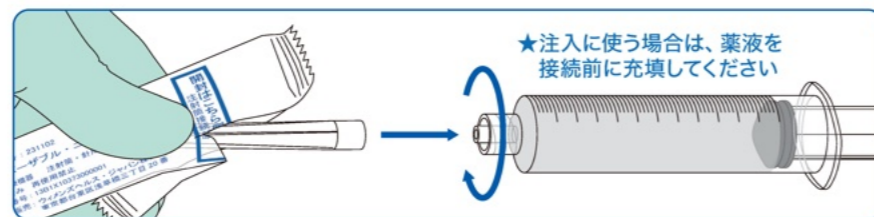


### 3. 装着後、袋から引き抜いて取り出す

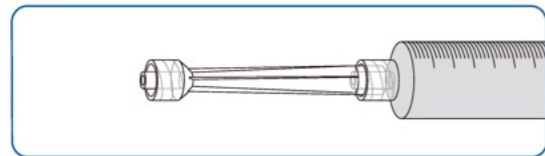

### 4. 注射針接続部に注射針の針基を取り付ける（ルアーロック）

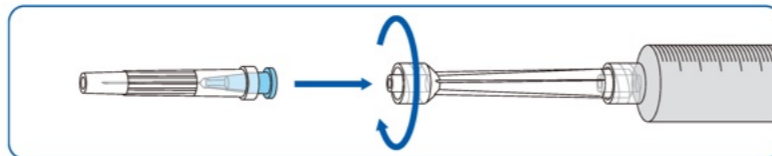

### 5. 本品と注射針のエア抜き後に注射針カバーを取り外し使用する

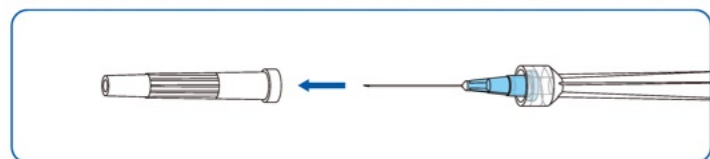

### 注意事項

- ・本品をご使用する際は、硬質の物で強打しないでください（破損のおそれがあります）
- ・締め方や接続後の取扱いにより接続が緩んだり、また過度な締め付けにより破損する可能性があります
- ・ご使用前またはご使用中にひび割れ等の異常が確認された場合は、新しい製品と交換してください
- ・ルアーチップ式（ルアーチップ式）は外れるおそれがあるので使用しないでください

発注コード	EXTD-SA-SET	セット名	エクステンダ アシスタセット	セット内容	・ディスポーザブル・ニードルエクステンダ (1箱) ・シリンジアシスタ® (4袋) ※各製品の数は20になります
製品コード	EXTD-20	製品名	ディスポーザブル・ニードルエクステンダ	最小販売単位	20本/1箱
製品コード	SA-10ML-5	製品名	シリンジアシスタ	最小販売単位	5セット/1袋

・ご使用の際は、使用説明書または電子添文をよくお読みの上、正しくお使いください

製造販売業者



ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社  
〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18 第8菊星タワービル2F  
www.womenshealthjapan.com

Women's Health Japan

【製品に関するお問合せTEL】03-6240-9611



WHJ-PC0022-EXTD\_SA/2024.04(NA)B-N

# シリンジアシスタ®

## シリンジ用補助アクセサリ

## 局所麻酔時の シリンジ操作をアシスト



# ディスポーザブル・ ニードルエクステンダ

## 注射針とシリンジの間に接続する延長機器

## 長い針を使わずとも深部・遠位部への 薬液注入をサポート

For Women's Health and Wellness

# シリンジアシスタ<sup>®</sup>

用途に応じて、単品もしくはセット品をお選びください

- 手元がブレにくく、安定した注入吸引操作が可能
- 逆血の確認時にシリンジの持ち替えが不要
- 片手で操作可能、視線を針先に集中しやすい
- 接続しやすく操作がスムーズに
- 滅菌済み
- 再使用禁止


\* 局所麻酔以外の注射操作時にもお使いいただけます  
登録意匠第1675081号 第1675082号

## ■ プランジャアシスタ



指を通す向きを示す「指マーク」  
プランジャアシスタおよび外筒アシスタのフィンガーリングには指を通す向きを示す「指マーク」が表示されています


## ■ 外筒アシスタ

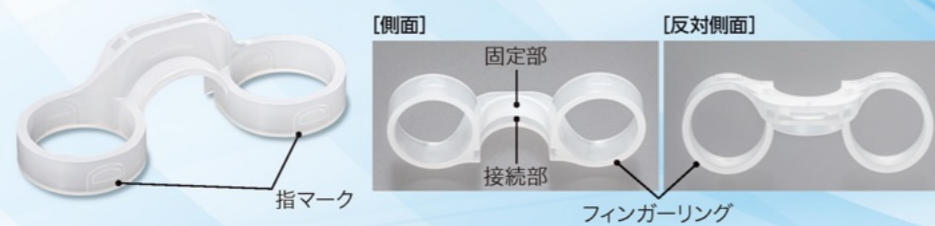

# ディスポーザブル・ニードルエクステンダ

- シリンジと注射針の間に接続することで距離を確保
- 長い針による刺し過ぎリスクを低減
- ルアーロック式接続によりしっかりと固定
- 便利で衛生的な個包装
- 滅菌済み
- 再使用禁止

ルアーロック式の注射筒と注射針を接続し、延長管として使用します

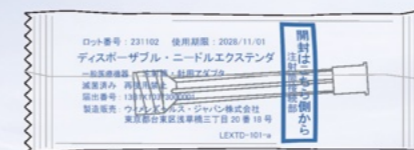

←こちら側のどこからでも開封可能

販売名：ディスポーザブル・ニードルエクステンダ  
一般的名称：注射筒・針用アダプタ  
医療機器届出番号：13B1X10373000001  
クラス分類：一般医療機器  
登録意匠第1752087号