

ディスポーザブル・ ニードルエクステンダ

新発売

注射針とシリンジの間に接続する延長機器

標準的な注射針*のまま
離れた部位への操作を実現
～長い針による刺し過ぎリスクを低減～



- シリンジと注射針の間に接続することで距離を確保
- 長い針を使わずとも深部・遠位部に薬液を注入可能
- ルアーロック式接続によりしっかりと固定
- 便利で衛生的な滅菌済み個包装



傍頸管ブロック/頸管内ブロック等の
操作を容易に




※全長 30mm 前後の長さの針

登録意匠第 1752087 号

ルアーロック式の注射筒と注射針を接続し、延長管として使用します

再使用
禁止

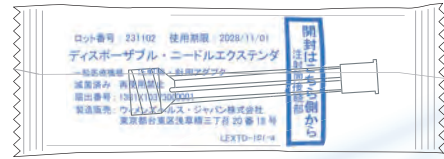


←こちら側のどこからでも開封可能

ディスポーザブル・ニードルエクステンダの取出し方および使用方法


1.

袋を開封し、注射筒接続部を引き出す

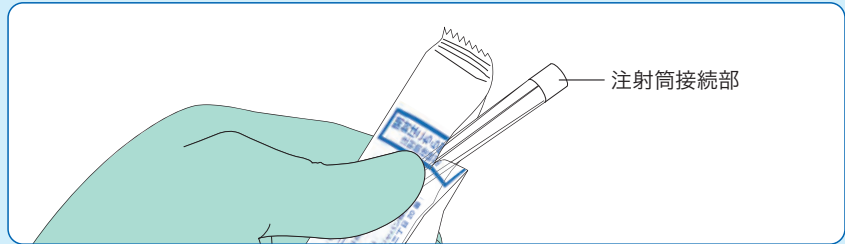


2.

薬液が充填された注射筒の先端ルアーロック部に、注射筒接続部を取り付ける

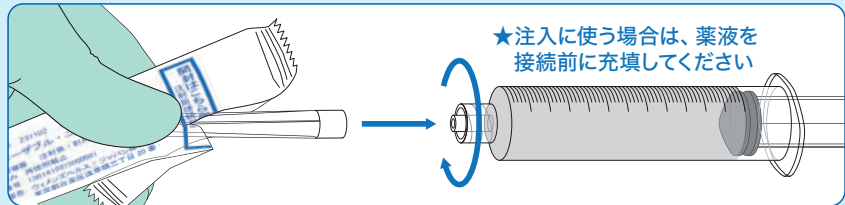


3.

装着後、袋から引き抜いて取り出す

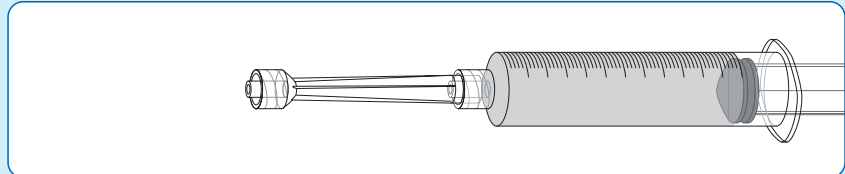


4.

注射針接続部に注射針の針基を取り付ける (ルアーロック)

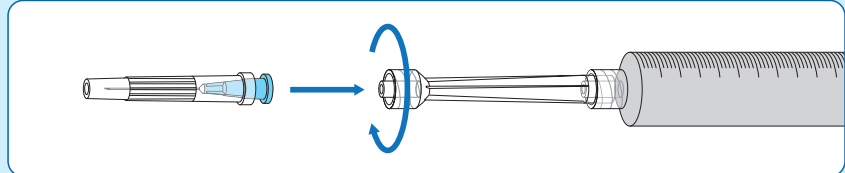

5.

本品と注射針のエア抜き後に注射針カバーを取り外し使用する

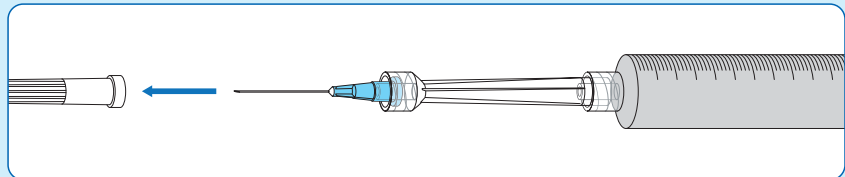

注意事項

- ・本品をご使用する際は、硬質の物で強打しないでください (破損のおそれがあります)
- ・締め方や接続後の取扱いにより接続が緩んだり、また過度な締め付けにより破損する可能性があります
- ・ご使用前またはご使用中にひび割れ等の異常が確認された場合は、新しい製品と交換してください
- ・ルアースリップ式 (ルアーチップ式) は外れるおそれがあるので使用しないでください

販売名: ディスポーザブル・ニードルエクステンダ
 一般的名称: 注射筒・針用アダプタ
 医療機器届出番号: 13B1X10373000001
 クラス分類: 一般医療機器

製品コード	EXTD-20	製品名	ディスポーザブル・ニードルエクステンダ	最小販売単位	20本/1箱
-------	---------	-----	---------------------	--------	--------

・ご使用の際は、電子添文をよくお読みの上、正しくお使いください

製造販売業者



Women's Health Japan

ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社
 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18 第8菊星タワービル2F
 www.womenshealthjapan.com
 【製品に関するお問合せTEL】 03-6240-9611



WHJ-PC0020-EXTD/2024.04(NA)B-N