

Single Valve アスピレータの 取り扱い方法



販売名: Women's MVA システム

一般的名称: 吸引子宮カテーテル/単回使用医療用拡張器

医療機器認証番号: 227ADBZX00175000

クラス分類: 管理医療機器

* Single Valve アスピレータを含む「Women's MVA システム」すべての製品は単回使用製品です

* ご使用の際は、電子添文をよくお読みの上、正しくお使いください

製造販売業者



Women's Health Japan

ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18 第8菊星タワービル2F
www.womenshealthjapan.com

【製品に関するお問合せTEL】 03-6240-9611

WHJ-RAQA0001-SVS/2024.07/A-N

Ipas MVA Technology

Ipas MVA 製品は1970年代に米国Ipas社によって開発されました。

FDA 認可、CE マーク、ISO13485 等、規制当局の認可を取得し、40年以上にわたり世界100カ国以上で使用されています。

Women's MVA システムはIpas MVA 製品です。



“Ipas” 刻印の例




←組み立て方法の動画はこちら

Single Valve アスピレーター (以下、SVS) の成り立ち

MVA製品は1970年代にアメリカ合衆国国際開発庁の支援を受け開発されました。世界中で掻爬 (D&C) をなくし、吸引で安全なSafe Abortionを浸透させたいという開発者の意図のもと、当時の材料工学で設計された製品がSingle Valve アスピレーター (SVS) です。SVSはその後、長きにわたり多くの国で使用されていますが、基本的な設計や構造は開発当初から大きな変化はなく、各部品から組み立てられて製造されています。SVSの構造はそのような歴史に基づいています。


万が一、使用前や使用中に下記の各部が外れてしまった際は、記載の手順で組み立て直す、もしくは新しい製品をお使いください

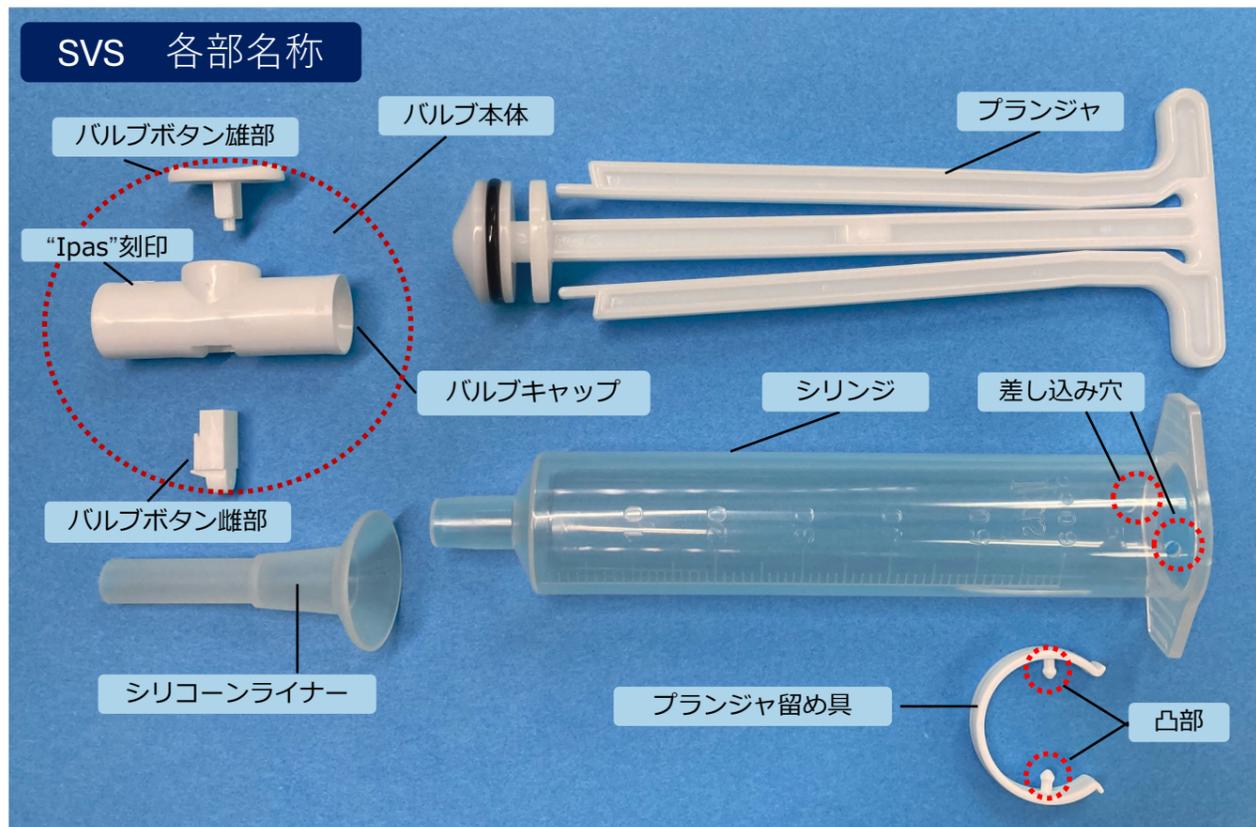

組み立て方法


① バルブ本体が外れた場合

*本操作はバルブ本体を手で持ち (STEP1)、宙に浮かせた状態で行ってください

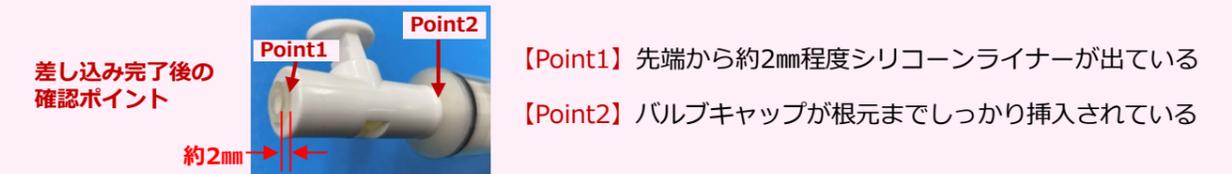


上手に差し込むことができない例

例 1 バルブボタンは下を向いているのに入らない

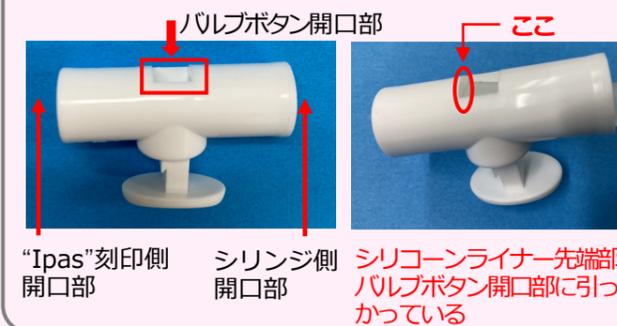


例 2 バルブボタンが上を向いているので入らない

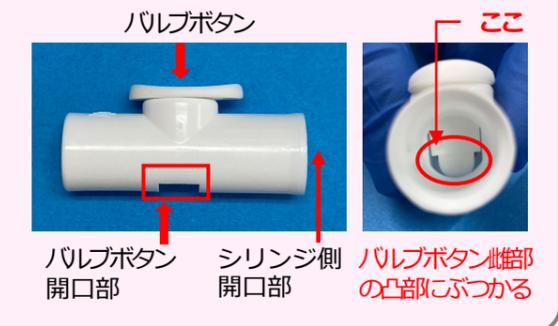

STEP1、2を参照しバルブボタンを下に向けシリンジを回転させながら差し込むことで挿入できます

② シリコンライナーが浮いていた場合

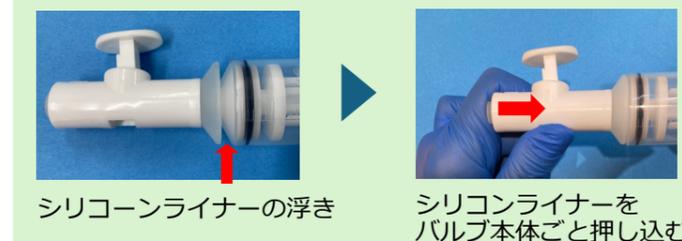

③ プランジャ留め具が外れた場合

強い力でプランジャを引くことで、まれにプランジャ留め具が外れたり破損したりすることがあります。その場合は当該製品を使用せず新しい製品に交換してご使用ください

