

シリンジアシスタ[®]

新素材


シリンジ用補助アクセサリ

局所麻酔時の シリンジ操作をアシスト

改良! 軟性樹脂採用で操作性アップ

- 手元がブレにくく、安定した注入吸引操作が可能
- 逆血の確認時にシリンジの持ち替えが不要
- 片手で操作可能、視線を針先に集中しやすい
- 接続しやすく操作がスムーズに
- 滅菌済み



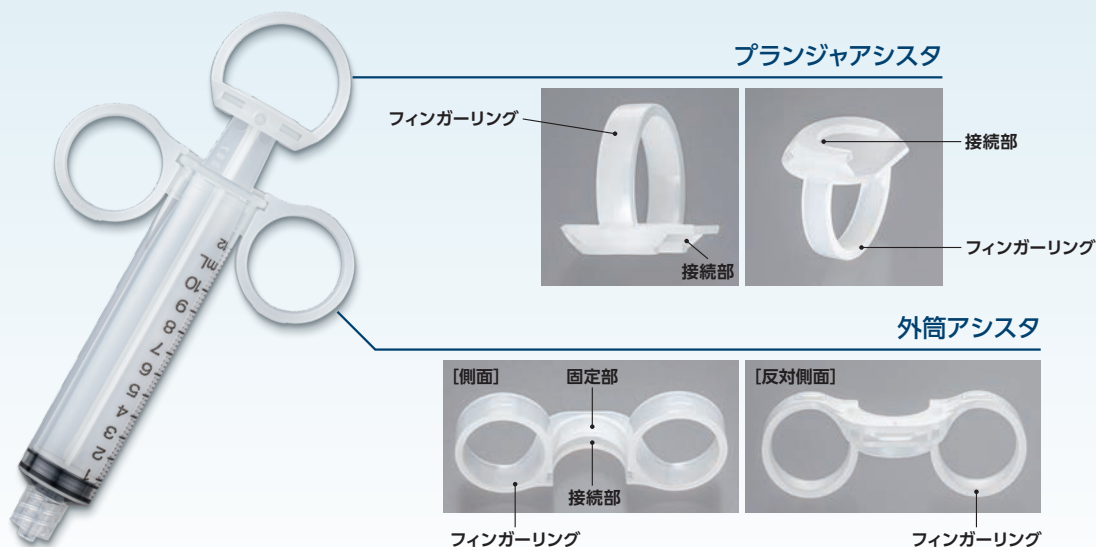

指を通す向きを示す「指マーク」


プランジャアシスタおよび外筒アシスタのフィンガーリングには指を通す向きを示す「指マーク」が表示されています

シリンジアシスタの接続方法


① プランジャとプランジャアシスタの接続

プランジャトップをプランジャアシスタの接続部の凹みにしっかり差し込む

脱落防止のツメがあるため、挿入には少し抵抗があります
プランジャトップを回しながら進め、最後まで押し込むと確実に接続できます

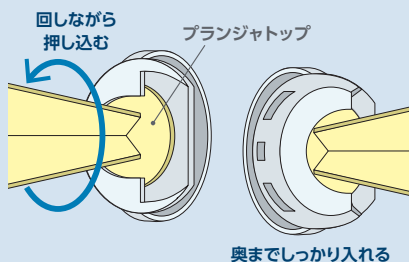


使用者の指と「指マーク」の向きを合わせてください

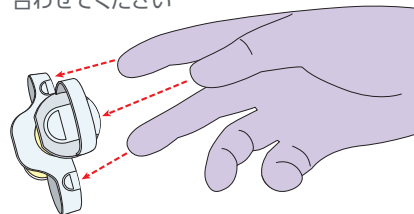


② 外筒と外筒アシスタの接続

フィンガーリングがフランジの筒先側に来るように接続する。外筒のフランジを縦にして、外筒アシスタの接続部の凹みにしっかり差し込む

最後まで押し込むことで確実に接続できます

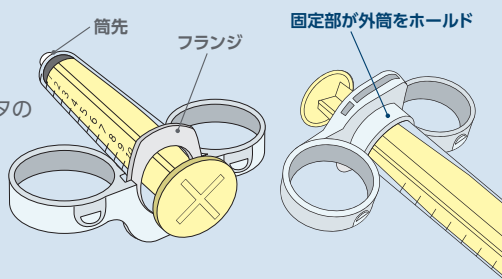


使用時に目盛りが読み取れる方向に接続してください

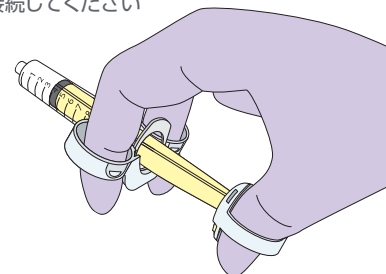


注意事項

- ・本品は10mLシリンジ専用です
- ・ご使用前に本品とシリンジとの適合性を必ずご確認ください
- ・しっかり接続できない場合は使用しないでください
- ・再滅菌不可(融解・変形のおそれがあります)

[接続時の注意点]

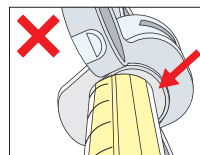

外筒アシスタと外筒に隙間ができています

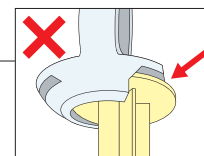

プランジャアシスタが奥まで入っていない

製品コード	SA-10ML-5	製品名	シリンジアシスタ	販売単位	5セット/袋
-------	-----------	-----	----------	------	--------

●ご使用の際は、使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください

