

シリンジアシスタ[®] (シリンジ用補助アクセサリ)

使用説明書

【注意事項】

- 本品は10mLシリンジ専用です
- ご使用前に本品とシリンジとの適合性を必ずご確認ください
- しっかり接続できない場合は使用しないでください

使用目的

本品はシリンジに接続して使用するシリンジ用補助アクセサリです

構成

本品はプランジャアシスタと外筒アシスタから構成されます



プランジャアシスタ



外筒アシスタ



シリンジにセットした図

指を通す向きを示す「指マーク」


各部名称

プランジャアシスタ



フィンガーリング (ここに親指を通す) 接続部 (プランジャトップを挿入し接続する)

外筒アシスタ

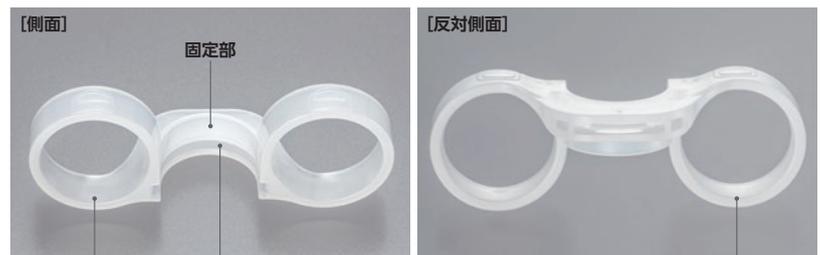


フィンガーリング (ここに指を通す) 接続部 (外筒のフランジを挿入し接続する)

フィンガーリング

各部の接続と使用方法

1 プランジャアシスタとプランジャ(押し子)の接続

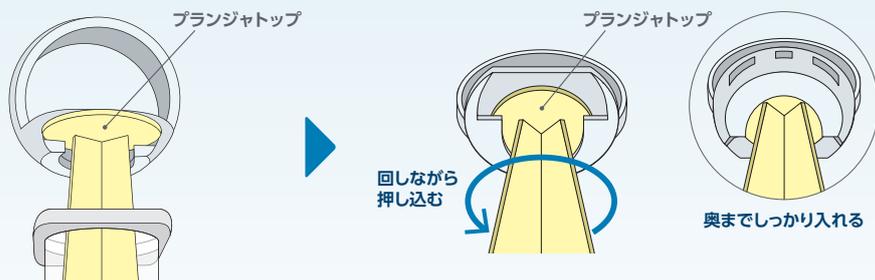

プランジャアシスタの接続部にプランジャトップを挿入する


接続部の凹みにしっかり差し込む

- 脱落防止のツメがあるため、挿入には少し抵抗があります
- プランジャトップを回しながら進め、最後まで押し込むと確実に接続できます

ご使用前に

シリンジ内に液体等を吸引する前に、シリンジアシスタを取り付けてください

2 外筒アシスタと外筒の接続

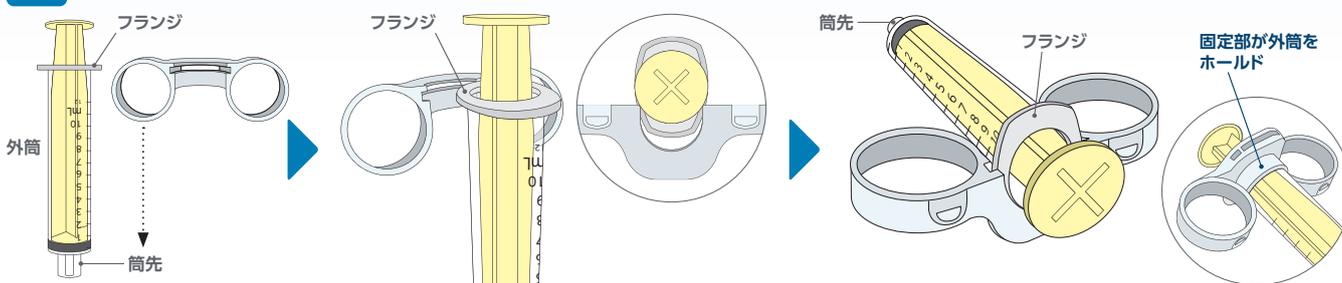

フィンガーリングがフランジの筒先側に来るように接続する


外筒アシスタの接続部に外筒のフランジを縦にして挿入する

接続部の凹みにしっかり差し込む


- 最後まで押し込むと確実に接続できます
- 使用時に目盛りが読み取れる方向に接続してください

3 「指マーク」の向きに合わせて指を通す


使用者の指と「指マーク」の向きを合わせてください

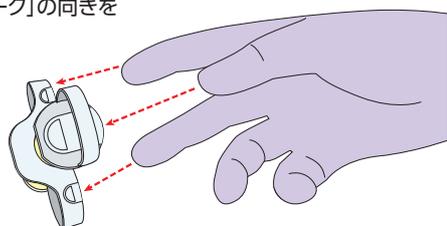


使用時に目盛りが読み取れる方向に接続してください

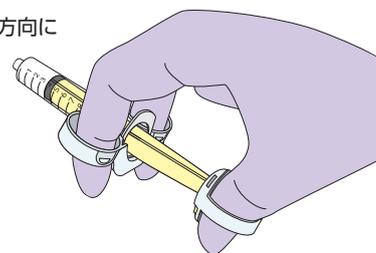

[接続時の注意点]

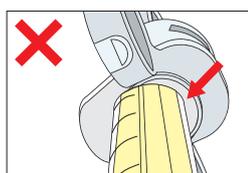

外筒アシスタと外筒に隙間ができている

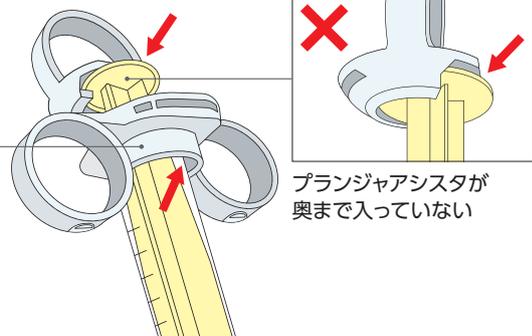

プランジャアシスタが奥まで入っていない

[使用上の注意点]

- 確実に接続していることを確認し使用してください
- しっかり接続できない場合は外れるおそれがあるので使用しないでください

登録意匠第1675081号 第1675082号

製造販売業者



Women's Health Japan

ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18 第8菊星タワービル2F

www.womenshealthjapan.com

【製品に関するお問合せTEL】 03-6240-9611



WHJ-PC0019-SA/2022.09/NA/A-N