

タイムスリン® クイックガイド

はじめにご確認ください

本品のパッケージには次のものが入っています。はじめに内容物をご確認ください。

- 本体
- 取扱説明書
- 使用開始日シール
- 本クイックガイド

使用上の注意

- 1) 本品はプレフィルド型インスリン製剤に取り付けて使用します。他の製剤には使用しないでください。
- 2) 本品はランタスXR注ソロスターには対応していませんので、ご使用にならないでください。

- 3) スクリーンタブを引き抜いても通電しない場合は本品を使用せず、販売業者までご連絡ください。
- 4) あなたのタイムスリンを他の人に使用させないでください。また、他の人のタイムスリンを使用しないでください。
- 5) タイムスリンの使用期限は未使用状態で製造年月日から3年です（製造年月日は外箱に貼られています）。
- 6) タイムスリンの電池寿命は使用開始から1年です。
- 7) 未使用の場合も、電池切れの場合も、本品を廃棄するときは、各区市町村の指示に従って適切に廃棄ください。

使用製剤との適合性

この度は、タイムスリンをご購入いただきましてありがとうございます。本品をご使用になる前に、タイムスリン本体に貼られている製品シールをご確認のうえ、下表をもとに、ご自身の使用製剤とタイムスリンが合っているかどうかをご確認ください。合っていない場合は、本品を使用しないでください。

タイムスリン® フレックスペン®用 <small>本体には以下のシールが貼ってあります</small> フレックスペン用	ノボ ノルディスク ファーマ株式会社	ノボラピッド®注 フレックスペン® ノボリン®R注 フレックスペン® レベミル®注 フレックスペン® ノボリン®N注 フレックスペン® ノボリン®30R注 フレックスペン® ノボラピッド®30ミックス注 フレックスペン® ノボラピッド®50ミックス注 フレックスペン® ノボラピッド®70ミックス注 フレックスペン®
タイムスリン® フレックスタッチ®用 <small>本体には以下のシールが貼ってあります</small> フレックスタッチ用	ノボ ノルディスク ファーマ株式会社	ノボラピッド®注 フレックスタッチ® フィアスプ®注 フレックスタッチ® トレシーバ®注 フレックスタッチ® ライゾデグ®配合注 フレックスタッチ® ゾルトファイ®配合注 フレックスタッチ®
タイムスリン® ミリオペン®用 <small>本体には以下のシールが貼ってあります</small> ミリオペン用	日本イーライリリー 株式会社	ヒューマログ®注 ミリオペン® ヒューマログ®注 ミリオペン®HD ヒューマリン®R注 ミリオペン® インスリン グラルギン®BS注 ミリオペン®「リリー」 ヒューマリン®N注 ミリオペン® ヒューマリン®3/7注 ミリオペン® ヒューマログ®ミックス25注 ミリオペン® ヒューマログ®ミックス50注 ミリオペン®
タイムスリン® ソロスター®用 <small>本体には以下のシールが貼ってあります</small> ソロスター用	サノフィ株式会社	アピドラ注® ソロスター® ランタス注® ソロスター®※


※ランタスXR注ソロスターには対応していません

インスリン製剤名及び専用注入器名は各社の登録商標です

① 正しく持ちましょう

例としてミリオペンで示しています


液晶パネルの右側に Timesulin[®] がくるように持ってください。

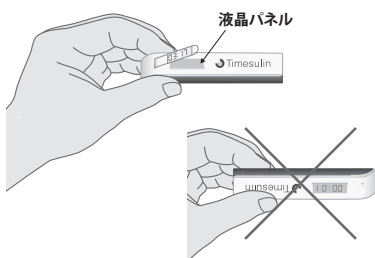

*逆さに持つと数字を読み間違えますので正しく持つようにしてください

② タイマーを作動させましょう


スクリーンタブを引き抜いてタイマーを作動させます。LED画面に「00:00」と表示され点滅します。

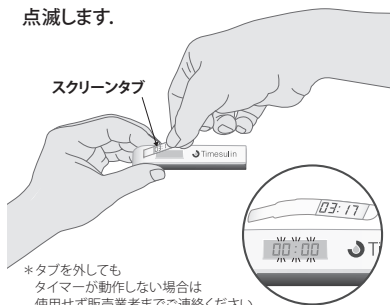

*タブを外してもタイマーが動作しない場合は使用せず販売業者までご連絡ください

③ インスリンペンを挿入してみましょう


プレフィルド型インスリン製剤を差し込むとタイマーがカウントアップし始めます。カチッと音がまでしっかり奥まで差し込んでください。

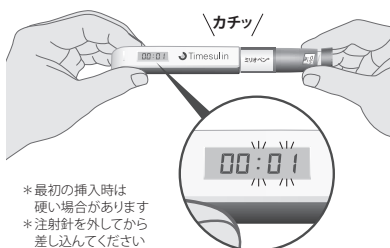

*最初の挿入時は硬い場合があります
*注射針を外してから差し込んでください

④ タイマーをリセットしてみましょう

タイムスリンからプレフィルド型インスリン製剤を外すと、タイマーは点滅を続けながらカウントアップし、8秒経つとリセットされて「00:00」の点滅状態に戻ります。

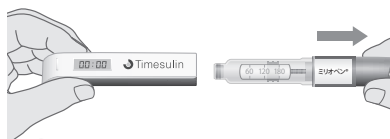

例 外す → 01:56 → 01:57 → 01:58 → 01:59
→ 02:00 → 02:01 → 02:02 → 00:00

*8秒以内にインスリン製剤を戻せばリセットされません
インスリン残量を確認するときは素早く行ってください

⑤ 液晶パネル(LED)はこのように表示されます

分/秒の場合

コロ点滅 + 秒カウントアップ

20:15

*分/秒は59:59までカウントします

時間/分の場合

コロ点滅のみ

03:17

*時間/分は99:59までカウントします

⑥ 使用開始日シールを貼りましょう

パッケージには「使用開始日シール」が同梱されています。電池の有効期限が分かるように使用開始日シールをお使いください。

